

UK

Блефаклін® / Vlephaclean

стерильні серветки для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри.

Серветки зволожені очищувальним лосьйоном з дуже хорошою переносимістю, без консервантів.

Властивості та показання до застосування:

Блефаклін® рекомендований для щоденної гігієни повік та чутливої шкіри, а також для підтримувannya чистоти повіки до і після офтальмологічних процедур. Не містить детергентів і консервантів. Блефаклін® ніжно видаляє найменші забруднення, пил, залишки косметики без подразнення очей або ушкодження зовнішнього шару епідермісу (поверхневий шар шкіри). Завдяки продуманій формулі, Блефаклін® не тільки очищує шкіру, але й зволожує її зовнішній шар.


Чутлива шкіра заспокоюється і відновлюється завдяки вмісту гіалуронової кислоти (природний шкірний зволожувальний агент), каприлоїл гліцину і екстракту кореня Іриса флорентійського (регулюють утворення шкірного жиру), Центели азійської (тонізуючий ефект). Завдяки тому, що Блефаклін® не містить ароматизаторів та масел, його не треба змивати після використання.

Блефаклін® може бути рекомендований тим, хто користується контактними лінзами.


Можна застосовувати для дітей від 3 місяців.

Спосіб застосування:

1. Гігієна повік та вій:
Відкрийте саше та розгорніть серветку, що вкладена всередині. Закрийте око, обережно прикладіть серветку до повік та основи вій. Ніжно помасажуйте повіко невеликими круговими рухами, м'яко видаляючи кірки, виділення чи косметичку.

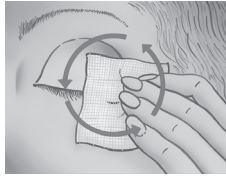

2. Гігієна краю повіки:
Перед дзеркалом, обережно відтягніть повіко, легко натягуючи вій. Ретельно протріть край повіки, користуючись згорнутою у трубочку серветкою.

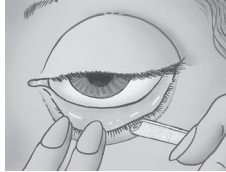

Повторіть всю процедуру з іншим оком, використовуючи нову серветку.

Рекомендовано застосовувати двічі на день, ранком та ввечері. Немає необхідності змивати після використання.

Склад:

вода, ПЕГ- 8, полоксамер 184, полісорбат 20, каприлоїл гліцин, пропіленгліколь, ПЕГ- 6 гліцериди каприлової/капрінової кислот, екстракт *Центели азійської*, спирт (від 0,2 % до 0,5 % ваги лосьйону), калію гідрофосфат, натрію гідроксид, екстракт кореня *Ірису флорентійського*, калію дигідрофосфат, цинку сульфат, ППГ- 5 Цетет 20, ретинілу пальмітат, натрію гіалуронат.

Умови використання та застереження:

Для нанесення на шкіру. Не слід наносити безпосередньо в очі. Тримати в недоступному для дітей місці.

Умови зберігання:

Зберігати при кімнатній температурі.

Форма випуску:

Одноразова стерильна серветка у саше. По 20 серветок у картонній коробці.

Виробник:

Лаборатуар Теа; 12 вул. Луї Блеріо 63100 Клермон-Ферран Седекс 2, Франція.
Тел.: + 33 4 73 98 14 36.
www.laboratoires-thea.com
[Laboratoires Thea;
12 rue Louis Blériot
63100 Clermont-Ferrand Cedex 2,
France.Tel.: + 33 4 73 98 14 36.
www.laboratoires-thea.com]

на заводі Євро Вайпс, шосе де Сен Пьер ла Брюйер Бізнес парк де л'Оне 28400 Ножан ле Ротру, Франція.
Тел.: 00 33 (0) 237 545 070.
www.eurowipes.com [Euro Wipes,
Route de St Pierre la Bruyere Parc
d'Activites de l'Aunay 28400 Nogent
le Rotrou, France.Tel.: 00 33 (0) 237
545 070. www.eurowipes.com].

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів
Висновок державної сан.-епід. експертизи
№ 12.2-18-3/14443 від
02.07.2019 р.